



Fachhandel für Tiertherapie. Tierisch Gesundes.

www.carepet.de

Kirschkernkissen sind altbewährte Hausmittel.
Kirschkerne sind hervorragende Wärme- und Kältespeicher und schaffen Linderung für Sie oder Ihren Vierbeiner.

Aufgrund ihrer Größe und Beschaffenheit sind Kirschkernkissen ideal als Massageunterstützung.

Anwendungsmöglichkeiten

Zur Schmerzlinderung und Entspannung, bei Muskelverspannungen, bei Gelenkentzündungen, zur Durchblutungsförderung, zum Vor- und Anwärmen von Liegeplätzen.

Gebrauchsanleitung

Wärmeanwendung

Im Backofen bei 80 – 110 °C ca. 10 – 15 Minuten (Umluft)
In der Mikrowelle bei 360 Watt ca. 2 Minuten

Kälteanwendung

Das Kirschkernkissen für kurze Zeit in einer Plastiktüte im Kühl- oder Gefrierfach aufbewahren.

Pflegehinweis

Kirschkerne sind bis 60°C waschbar.

Wichtig: Nach der Wäsche muss das Kissen gründlich getrocknet werden!